

SE Användarmanual Motordrivna Tvättställslyftare



SE Produkter

Elektriskt höj- och sänkbara tvättställ

Tvättställslyft - Basicline 415

Tvättställsmodul - Basicline 433

Tvättställsmodul - Designline 417

1. Introduktion
2. Försäkran om överensstämmelse med EU-Direktiv
3. Avsedd användning
4. Tekniska data
5. Säker användning
6. Säkerhetsutrustning
7. Lastfördelning och sidokrafter
8. Åtgärder efter avslutad användning
9. Anvisningar för återanvändning
10. Reservdelslista
11. Elsystem

1. Introduktion

Vi har nöjet att leverera en tvättställslyftare, ett elektriskt höj- och sänkbart lyftsystem för montering av nya eller befintliga tvättställ utan underskåp.

Endast behöriga personer får använda Tvättställslyftaren!

Behörighet innebär skyldighet att ta del av, samt följa instruktionerna. Det är mycket viktigt att ni läser och förstår instruktionerna innan ni använder Tvättställslyftaren. Om ni har frågor - kontakta Er leverantör.

Denna Instruktion ska finnas tillgänglig för berörd personal, förvaras på skyddad plats och ska åtfölja produkten, om den övergår till annan installationsplats eller annan bostadsägare.

Korrekt användning, manövrering, inspektioner och underhåll är avgörande för effektivt och säkert arbete.

2. Försäkran om överensstämmelse med EU-Direktiv

Denna produkt är CE-märkt och försäkras därmed vara i överensstämmelse med de grundläggande kraven gällande funktion och säkerhet, i enlighet med de aktuella Maskin-, EMC- och Lågspänningsdirektiven. Separat "EG-Försäkran om överensstämmelse" återfinns i separat dokument.

3. Avsedd användning

Tvättställslyftaren är avsedd att genom en vertikalrörelse manövrera ett tvättställ och i förekommande fall spegel och belysning till en bekväm placering. Användningen ska ske inomhus under normala bostadsförhållanden beträffande temperatur, fuktighet och belysning.

Tvättställslyftaren, som har elskyddsklass IP X4, är avsedd för användning i fuktiga utrymmen, men inte för översköljning och spolning med vatten. Den spiralkabelförsedda handkontrollen har skyddsklass IP 65.

Det är absolut förbjudet för personer att vistas på tvättstället, eller att använda den för lyft av personer. Det är heller inte tillåtet att använda lyftaren eller tvättstället som uppresningsstöd.

4. Tekniska data

			
Elanslutning	230 V / 120 V 345 W / 324 W	230 V / 120 V 345 W / 324 W	230 V / 120 V 345 W / 324 W
Hastighet	18 mm / s	18 mm / s	18 mm / s
Slaglängd	250 mm	250 mm	250 mm
Lyftkraft	150 kg	150 kg	150 kg
Maxbelastning *	40 kg*	40 kg*	40 kg*
Max antal arbetscykler	1 / 10 min.	1 / 10 min.	1 / 10 min.

* Utbredd last på tvättställ

5. Säker användning

Tvättställslyftaren är konstruerad och försedd med säkerhetsanordningar för att förebygga och undvika skador och olyckor. Det är ändå mycket viktigt att användaren är väl instruerad i sättet att installera och handha Tvättställslyftaren. I det följande avses med Tvättställslyftaren såväl maskinen som påmonterat tvättställ och ev. spegel.

- Använd Tvättställslyftaren endast till det den är avsedd för.
- Handhavandet måste ske på ett sådant sätt att risk för skador på person och egendom inte uppstår.
- Tvättställslyftaren får endast handhas av personer som läst och förstått dessa instruktioner och har behörighet för att använda den. Tänk på att du som användare har ansvar för att ingen kommer till skada.
- Tvättställslyftaren och arbetsområdet måste vara i fullgott skick. Tvättställslyftaren får ej användas om skador eller fel uppkommit som påverkar drift- och funktionssäkerheten. Ej heller om Tvättställslyftaren har reparerats, ändrats eller justerats utan ansvarig persons tillstånd och godkännande.
- Tillse att Tvättställslyftaren monteras på fast, plan och helt vertikal vägg med tillräckliga fastsättningsförband för den totala vikten inkl. tvättställ, innehåll i detta, spegel och föremål.
- Manöverdonet ska vara placerat så att operatören har full uppsikt över Tvättställslyftaren och dess omgivning under hela tiden som rörelser äger rum.
- Vidrör inte någon del av lyftaren vid körning. Tryck enbart på manöverknappen för önskad rörelseriktning.
- Stick aldrig in händer, armar, ben eller andra kroppsdelar eller föremål under tvättstället då Tvättställslyftaren körs.
- Observera klämrisk mellan Tvättställslyftaren och intilliggande skåp och bänkar.
- Endast laster som är stabilt och säkert arrangerade får hanteras. Tänk på stjälningsrisken för material som har instabil uppställning, t.ex. som är vårdslöst staplat. Om tvättstället är vippbart är risken för att tippa av föremål eller tippa ur vatten extra stor.
- Låt aldrig Tvättställslyftaren komma i kontakt med angränsande föremål.
- Förändringar av Tvättställslyftaren som påverkar drift- eller funktionssäkerhet är inte tillåtna.
- Skyltar och märkningar får ej avlägsnas eller göras oläsliga.
- Överbelasta inte Tvättställslyftaren och ge akt på att lastfördelningen är den rätta.
- Det är absolut förbjudet för personer att vistas på tvättstället eller att använda lyftaren för lyft av personer. Det är heller inte tillåtet att använda lyftaren som uppresningsstöd.
- Använd säkra och tillräckliga lyftmetoder vid hantering av last till och från Tvättställslyftaren. Ge speciellt akt på hantering av tungt gods, samt gods med farligt innehåll eller med vassa hörn och kanter.
- Tvättställslyftaren ska årligen genomgå kontroll i syfte att förebygga olycksfall.
- Boverkets, Elsäkerhetsverkets, Arbetsmiljöverkets och andra myndigheters föreskrifter ska efterlevas.
- Använd inte Tvättställslyftaren som domkraft för t.ex. lyft av varor från golvet.
- Lyftaren ska inte ha direktkontakt med livsmedel.
- Använd inte Tvättställslyftaren i potentiellt explosiv miljö.
- Vid användning i publik miljö, speciellt där barn kan komma in i lyftarens arbetsområde, ska operatören vidta tillräckliga åtgärder för att förhindra att personer kommer in i riskområdet då lyftaren körs t.ex. genom att avspärra arbetsområdet.
- Vid inspektioner, service och reparationer ska det ej finnas last på tvättstället. Vid service nås de vanligaste funktionerna genom att demontera spegel och montageplatta.
- Installation, service och reparationer får endast utföras av personal som har erforderlig kompetens.
- Endast originalreservdelar ska användas vid utbyte av delar. Vårt garantiåtagande kan annars upphävas i sin helhet.

6. Säkerhetsutrustning



Säkerhetsbrytaren sitter mellan lyftenhet och tvättställ. Om tvättstället kommer i kontakt med något föremål eller brukarens ben stoppas sänkningen. (Säkerhetsbrytaren är tillbehör till vissa modeller).

7. Lastfördelning och sidokrafter

Grundkravet på lastfördelning:

- **100 % av märklasten utbredd över hela tvättställsytan, med tyngdpunkten i tvättställsytan.**
- **Sidokrafter tillåts ej.**

Sidokrafterna uppstår t.ex. genom att man trycker mot Tvättställslyftaren. Det är mycket svårt att kontrollera hur stor den aktuella sidokraften är, så största försiktighet måste alltid iakttas.

Säkerhetsåtgärder kan krävas på eller intill Tvättställslyftaren. Diskutera lämpliga åtgärder med installatör eller med skyddsombud, arbetarskyddsbesiktningsman eller motsvarande.

Vi rekommenderar att en Riskanalys enligt Maskindirektivet upprättas för den aktuella arbetssituationen.

Om tilläggsutrustning monteras av brukaren måste tillverkaren kontaktas för godkännande av belastningsförhållandena.

8. Åtgärder efter avslutad användning

Tvättställslyftaren ska efter utfört arbete lämnas i sitt aktuella läge.
Stäng av huvudströmbrytaren om obehörig användning kan förekomma.
För att förhindra obehörig användning kan dessutom manöverdonet placeras inne i ett låsbart skåp.

9. Anvisningar för återanvändning

Vid återanvändning av tvättställslyftaren ska den rengöras, besiktigas och funktionskontrolleras innan den monteras upp på den nya platsen.

Maskinen är tillverkad av återvinningsbara material eller av material som kan återanvändas

10. Reservdelslista


Om någon detalj inte förefaller fungera eller har gått sönder, kontakta Er leverantör.

Endast originalreservdelar ska användas vid utbyte av delar. Vårt garantiåtagande kan annars upphävas i sin helhet.


Returnering av reservdelar:

Tag kontakt med tillverkaren vid retur av delar. Återsänd inte reservdelar som förslitits genom normal användning eller skadats genom olyckshändelse. Återsänd förslitna, skadade eller obrukbara delar om fel anses falla under garantiåtagandet. Returnera i så fall delarna omgående, annars kan rätten till ersättning kan gå förlorad.

Vid reservdelsbeställning var god ange Tvättställslyftarens tillverkningsnummer och typ.

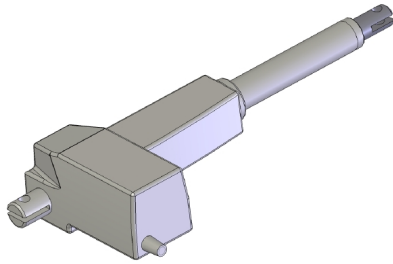

Motor

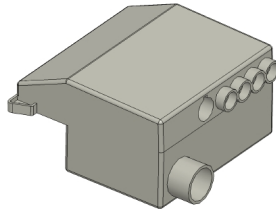

Styrenhet



Handkontroll med spiralkabel

11. Elsystem

