

## **SE** Drift och underhållsanvisning Basicline 415

---

### 1. Drift

Motordriven höj- och sänkbar tvättställslyftare som monteras under spegel eller spegelskåp. Flexibla vatten- och avloppsslangar döljs bakom ryggskiva / täckkåpa.

- Tryck in och håll in knappen för att starta manövreringen.
- Släpp knappen när skåpet befinner sig på önskad nivå.

#### **Pos. 1**

Sladdansluten handkontroll

#### **Pos 2.**

Tvättställslyftaren är utrustad med klämskydd. Klämskyddet stoppar rörelse vid motstånd.



### 2. Underhåll

Tvättställslyftaren är underhållsfri. Smörjning och andra åtgärder är utförda på fabrik för lyftarens hela livstid. Ur säkerhetssynpunkt bör dock vissa komponenter kontrolleras årligen.

- Inspektioner, service och reparationer ska utföras av kompetent personal.
- Tag bort föremål från tvättstället innan underhålls- och reparationsarbeten utförs.

### 3. Funktionsprov

- Kör lyftaren ner och upp hela vägen till respektive ändläge. Kontrollera att den löper fritt utan hinder och klämrisker och utan missljud. Kontrollera att den stannar och står kvar i nedre respektive övre läge.
- Kontrollera att inte kablar är skavda, klämda och att ingen risk för skador finns.
- Kör upp lyftaren till ändläge och kontrollera att slangarna är tillräckligt långa ovanför fixeringspunkten.
- Kontrollera att vägg- och tvättställsinfästningar är hela. Om lyftaren lutar på grund av sättningar i vägginfästningarna ska justering göras.
- Kontrollera klämskyddets funktion:  
Kör ner lyftaren samtidigt som framkanten av tvättstället lyfts upp. Kontrollera att sänkningen stoppas.

## 4. Rengöring

Rengör med ljummet vatten och rengöringsmedel. Använd mjuk trasa eller liknande. Efter rengöring ska ytorna torkas torra för att undvika kalkavlagringar.

**Repande rengöringsmedel eller repande verktyg t.ex. stålull får inte användas.  
Beakta att produkten innehåller elektriska komponenter.**

## 5. Driftbok - Service och underhåll

Order	Serial	Date
<b>Datum</b>	<b>Datum</b>	
<b>Signatur</b>	<b>Signatur</b>	
<b>Noteringar</b>	<b>Noteringar</b>	
<b>Datum</b>	<b>Datum</b>	
<b>Signatur</b>	<b>Signatur</b>	
<b>Noteringar</b>	<b>Noteringar</b>	