

SE Drift och underhållsanvisning Basicline 433

1. Drift

Motordriven höj- och sänkbar tvättställslyftare med integrerad spegel och belysning.

- Tryck in och håll in knappen för att starta manövreringen.
- Släpp knappen när tvättstället befinner sig på önskad nivå.

Pos. 1

Sladdansluten handkontroll

Pos 2.

Tvättställslyftaren är utrustad med klämskydd. Klämskyddet stoppar rörelse vid motstånd.



2. Underhåll

Tvättställslyftaren är underhållsfri. Smörjning och andra åtgärder är utförda på fabrik för lyftarens hela livstid. Ur säkerhetssynpunkt bör dock vissa komponenter kontrolleras årligen.

- Inspektioner, service och reparationer ska utföras av kompetent personal.
- Tag bort föremål från tvättstället innan underhålls- och reparationsarbeten utförs.

3. Funktionsprov

- Kör lyftaren ner och upp hela vägen till respektive ändläge. Kontrollera att den löper fritt utan hinder och klämrisker och utan missljud. Kontrollera att den stannar och står kvar i nedre respektive övre läge.
- Kontrollera att inte kablar är skavda, klämda och att ingen risk för skador finns.
- Kör upp lyftaren till ändläge och kontrollera att slangarna är tillräckligt långa ovanför fixeringspunkten.
- Kontrollera att vägg, tvättställs- och spegelinfästningar är hela. Om lyftaren lutar på grund av sättningar i vägginfästningarna ska justering göras.
- Kontrollera klämskyddets funktion:
Kör ner lyftaren samtidigt som framkanten av tvättstället lyfts upp. Kontrollera att sänkningen stoppas.

4. Rengöring

Rengör med ljummet vatten och rengöringsmedel. Använd mjuk trasa eller liknande. Efter rengöring ska ytorna torkas torra för att undvika kalkavlagringar.

**Repande rengöringsmedel eller repande verktyg t.ex. stålull får inte användas.
Beakta att produkten innehåller elektriska komponenter.**

5. Driftbok - Service och underhåll

Order	Serial	Date
Datum	Datum	
Signatur	Signatur	
Noteringar	Noteringar	
Datum	Datum	
Signatur	Signatur	
Noteringar	Noteringar	