

SE Felsökningsguide Baselift

Produkter

BASELIFT 6300 / 6310
 BASELIFT 6600 - KIT System
 BASELIFT CORNER 6301 / 6311
 BASELIFT CORNER 6302 / 6312
 BASELIFT CORNER 6303 / 6313
 Diskbänksmodul ES11
 Diskbänksmodul ES20
 Diskbänksmodul ES30
 Diskbänksmodul ESG
 Diskbänksmodul ESH
 Miniköksmodul ESF
 Miniköksmodul ESFS
 Miniköksmodul ES11S2
 Kombimodul ES11S4
 Kombimodul ES20S4
 Kombimodul ES30S4
 Kombimodul ESHS4
 Spishällsmodul S4
 Bänksmodul CT

Bänkliftaren är konstruerad och utprovad för att uppnå optimal driftsäkerhet och livslängd, under förutsättning att drift och skötsel samt kontroller utförs i enlighet med givna instruktioner. Om det ändå skulle uppstå något problem kan ni få vägledning enligt felsökningslistan nedan.

Tag bort eventuella föremål på bänken innan felsökning och reparationer utförs. Felsökning, service och reparationer ska utföras av kompetent personal. Om problem kvarstår efter att ni har vidtagit åtgärder i enlighet med listan nedan bör ni kontakta behörig reparatör eller er leverantör.

Symptom	Åtgärd
Bänkliftaren rör sig ej vid manöverpuls	<p>Kontrollera att det finns strömmatning i eluttaget.</p> <p>Kontrollera att kablarna sitter fast i manöverknappen.</p> <p>Försök att nollställa systemet genom att hålla in nedåtknappen i ca 5 sekunder. Nollställningen har lyckats om ett klickande ljud hörs. Försök nu köra lyftaren till sina ändlägen.</p>
Bänkliftaren rör sig ej vid manöverpuls och det klickar tre gånger från styrenheten	<p>Bänkliftaren går ej att manövrera om klämskyddet ej identifieras av styrenheten.</p> <p>Kontrollera att klämskyddslistan är ansluten och hel. Kontrollera anslutningarna mellan klämskydden om lyftaren är utrustad med flera klämlister.</p>
Bänkliftaren lutar åt sidan. Motorerna går ojämnt	<p>Utför en synkronisering av motorbenen. Kör nedåt tills lyftaren stannar, släpp knappen. Tryck in nedåtknappen igen och håll in ända till motorerna har rätat ut sig.</p>