

SE Felsökningsguide Centerlift 6490

Produkter

CENTERLIFT 6490H

Centerlift 6490, nedan kallad lyftaren är konstruerad och utprovad för att uppnå optimal driftsäkerhet och livslängd, under förutsättning att drift och skötsel samt kontroller utförs i enlighet med givna instruktioner. Om det ändå skulle uppstå något problem kan ni få vägledning enligt felsökningslistan nedan.

Tag bort eventuella föremål på bänken innan felsökning och reparationer utförs. Felsökning, service och reparationer ska utföras av kompetent personal. Om problem kvarstår efter att ni har vidtagit åtgärder i enlighet med listan nedan bör ni kontakta behörig reparatör eller er leverantör.

Symptom	Åtgärd
Lyftaren rör sig ej vid manöverpuls	<p>Kontrollera att det finns strömmatning i eluttaget.</p> <p>Kontrollera att kablarna sitter fast i manöverknappen.</p> <p>Försök att nollställa systemet genom att hålla in nedåtknappen i ca 5 sekunder. Nollställningen har lyckats om ett klickande ljud hörs. Försök nu köra lyftaren till sina ändlägen.</p>
Lyftaren rör sig ej vid manöverpuls och det klickar tre gånger från styrenheten	<p>Lyftaren går ej att manövrera om klämskyddet ej identifieras av styrenheten.</p> <p>Kontrollera att klämskyddslisten är ansluten och hel. Kontrollera anslutningarna mellan klämskydden om lyftaren är utrustad med flera klämlister.</p>
Lyftaren lutar åt sidan. Motorerna går ojämnt	<p>Utför en synkronisering av motorerna. Kör nedåt tills lyftaren stannar, släpp knappen. Tryck in nedåtknappen igen och håll in ända till motorerna har rätat ut sig.</p>