

SE Felsökningsguide InDiago 510

Produkter

InDIAGO 510

InDiago är konstruerad och utprovad för att uppnå optimal driftsäkerhet och livslängd, under förutsättning att drift och skötsel samt kontroller utförs i enlighet med givna instruktioner. Om det ändå skulle uppstå något problem kan ni få vägledning enligt felsökningslistan nedan.

Tag bort lasten från skåpinsatsen innan felsökning och reparationer utförs.

Felsökning, service och reparationer ska utföras av kompetent personal.

Symptom	Åtgärd
Skåpinsatsen rör sig ej vid manöverpuls	Kontrollera att säkringen till strömmatningen är hel. Kontrollera att kontakten till strömmatningen är isatt. Kontrollera att inte klämskyddsplattan är intryckt. Kontrollera att kablarna sitter fast i knappen. Om skåpinsatsen inte rör sig efter åtgärderna ska behörig reparatör och/eller er leverantör kontaktas