

## SE Felsökningsguide Motordrivna Tvättställslyftare

### Produkter

BASICLINE 415  
 BASICLINE 433 - med spegel och belysning  
 DESIGNLINE 417 - med spegel och belysning

Tvättställslyftaren är konstruerad och utprovad för att uppnå optimal driftsäkerhet och livslängd under förutsättning att drift och skötsel samt kontroller utförs i enlighet med givna instruktioner. Om det ändå skulle uppstå något problem kan ni få vägledning vad ni bör göra enligt felsökningslistan nedan.

Tag bort föremål från tvättstället innan felsökning och reparationer utförs. Felsökning, service och reparationer ska utföras av kompetent personal.

Om problem kvarstår efter att ni har vidtagit åtgärder i enlighet med listan nedan bör ni kontakta behörig reparatör eller Er leverantör.

Symptom	Åtgärd
<b>Tvättställslyftaren rör sig ej vid manöverpuls</b>	<p>Kontrollera att säkringen till strömmatningen är hel.</p> <p>Kontrollera att kontakten till strömmatningen är korrekt ansluten.</p> <p>Avlägsna montageskivan för att komma åt motor och styrenhet. Kontrollera indikeringslampan lyser grönt. Detta indikerar att det finns ström fram till styrenhet.</p> <p>Om lyftaren inte rör sig efter åtgärderna ska behörig reparatör och/eller Er leverantör kontaktas.</p> <p>Denne ska som första åtgärd, efter ovanstående kontrollpunkter, kontrollera att alla kablar är isatta och hela samt att signallampan på styrenheten lyser grönt.</p> <p>Om den ej lyser är styrenheten troligen defekt. Beställ ny enhet.</p>
<b>Klämskyddet fungerar ej (tillbehör)</b>	<p>Kontrollera att kabeln från klämskyddet är ansluten till uttag i lyftmodulens nederkant.</p>